

	<b>TRƯỜNG ĐHYK PHẠM NGỌC THẠCH</b> <b>PHÒNG KHÁM ĐA KHOA</b>	Mã số: Phiên bản: Ban hành: .... / .... / 2019
	<b>QUY TRÌNH VẬN HÀNH MÁY XQUANG</b>	

1. Kiểm tra nguồn và hệ thống cơ học của máy.
2. Kiểm tra kết nối hệ thống DR.
3. Mời bệnh nhân vào phòng chụp.
4. Nhân viên điều chỉnh tư thế bệnh nhân và đặt cassette tùy theo chiều cơ thể và bộ phận chụp, chỉnh đầu đèn và khu trú tia vào bộ phận cần chụp, điều chỉnh các thông số chụp cho phù hợp với từng bệnh nhân và vùng được chụp.
5. Nhân viên bước ra khỏi phòng chụp, đóng cửa phòng chụp.
6. Quan sát bệnh nhân qua kính chì, nếu tư thế bệnh nhân đã phù hợp thì bấm nút phát tia, nếu chưa phải điều chỉnh lại.
7. Mời bệnh nhân ra ngoài ngồi chờ kết quả.
8. Nhân viên xử lý phim và in phim
9. Bác sĩ X-Quang đọc kết quả phim và trả phim cho bệnh nhân.
10. Cuối buổi làm việc, phải kiểm tra hệ thống cơ học, cho máy vào chế độ nghỉ hoặc tắt máy.

**Ghi chú:**

- Không để chùm tia phát ra quá rộng so với bộ phận cần chụp.
- Đối với phụ nữ cần hạn chế chụp vào vùng bụng và khung chậu khi không cần thiết.
- Hạn chế chiếu tia vào mắt, nhất là trẻ em, tuyến giáp, bộ phận sinh dục....
- Chỉ chụp những bộ phận theo chỉ định của Bác sĩ lâm sàng.
- Tránh chụp đi chụp lại nhiều lần.
- Tiến hành che chắn để đảm bảo an toàn cho người phụ giúp bệnh nhân (nếu có).

TP. HCM ngày 04 tháng 10 năm 2019

**Trưởng Phòng khám**



**PGS.TS.BS NGUYỄN THANH HIỆP**